


Notice du en Français:

Lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif. Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.



Utilisation prévue, indications:

Le  est un dispositif médical dont l'objet est la protection curative et préventive des escarres des pattes, avant et arrière. Il peut être associé à des soins tels que pansements, et/ou vêtements divers ou produit d' incontinence.

Dispositif médical pour animal unique.

Caractéristiques:

demi coque ovale en mousse de polyuréthane souple HR, associé à une housse au design spécifique, la " Doggy Sock", permettant la solidarisation de la cuisse ou l'épaule avec le dispositif en mousse.


- Design anatomique et solidaire de la cuisse ou l' épaule
- Autorise tous les mouvements
- Facile d'utilisation et d 'entretien grâce à sa peau de surface
- Sa thermo-sensibilité change la couleur à l' endroit du contact avec le corps au-dessus de 39 degrés.
- Modèle bilatéral: les  peuvent être utilisés pour les cuisses comme les épaules. Celles-ci peuvent être placés sur un côté, une sangle "One side" permet l'attache à l' autre cuisse par l' intérieur, puis venant se scratcher sur le , sur le bas du dos.

Contre-indications, précautions:

La thermo-sensibilité est indicative sans valeur de mesure, elle ne se soustrait pas à un contrôle habituel ou/et inopiné du soignant. En effet, des facteurs environnants peuvent modifier les seuils, tel que l' exposition au soleil, le contact avec un objet chauffant,etc...

Consignes d' utilisation:

Mise en place du dispositif dans la housse

- 1- Mise en place du dispositif en mousse, le  (photo 1) dans la Doggy Sock (photo 2, 3).
- 2- Les sangles (photo 4) sont fournies , la "One side"permet l'utilisation d' dispositif unique, et par ailleurs , la "dorsale" (rallonge) permet de lier les deux dispositifs si nécessaire face à face.
- 3- Plier le dispositif en mousse dans le sens de la longueur.

- 4- Insertion du **Kinedog**TM^R , placer tel que le trou le plus haut en partie supérieure.(photo 1)
- 3- fermer la pression de la housse pour garder le **Kinedog**TM^R maintenu dans la zone à protéger(photo 5).

Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Conseils d'entretien et composition:

1/ **KinedogTM^R :**

Composition : 100 % mousse de polyuréthane HR ,Moins de 50% de densité,
peau de surface polyuréthane

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse ou, en cas de nécessité de désinfection,
par l'utilisation d'un produit pour usage hospitalier type Anios ou équivalent.

2/ housse :

Composition : 90% Polyester, 4% Viscose, 1% Elasthane

Entretien : Lavage 30°, à la main, repassage déconseillé, séchage machine
déconseillé, chlorage interdit, nettoyage à sec interdit.

Matières Oekotex100

Le dispositif complet est en M/L, (50 à 60 au garrot)

En cas de détérioration du dispositif médical, changez-le. Ne pas essayer de réparer cet article.

Important : Bien que tous nos efforts aient été portés sur l'utilisation de techniques de pointe afin d'obtenir un niveau optimal de fonctionnalités, de résistance, de

durabilité et de confort, il n'est pas garanti que l'usage de ce produit prévienne tout préjudice corporel.

Le packaging contient :

- 1 ™®
- 1 Housse Doggy sock
- 1 sangle dorsale
- 1 sangle "One Side"
- 1 NOTICE D'UTILISATION
- 1 ATTESTATION D'INFORMATION
POUR UN USAGE INDIVIDUEL

Matériau-vigilance

En cas d'incident quelqu'il soit, vous devez aller sur le site www.kinedog.com, cliquer sur la rubrique "contact", remplir le formulaire dédié.

Il est primordial de signaler quelque problème , afin d'engager toutes les démarches utiles et sécuritaires.

Toute observation, même mineure doit être échangée pour permettre la mise à jour, l'amélioration constante du dispositif.