

## Notice du **Kinepaw**<sup>TM®</sup> en Français:

Lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif. Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.

### **Utilisation prévue, indications:**

Le **Kinepaw**<sup>TM®</sup> est un dispositif médical dont l'objet est la protection curative et préventive des escarres des pattes, avant et arrière. Il peut être associé à des soins tels que pansements, et/ou vêtements divers ou produit d' incontinence.

Dispositif médical pour animal unique.

### **Caractéristiques:**

Cocon ovale en mousse de polyuréthane souple HR, associé à une chaussette élastifiée au design spécifique, la " Cocoon Sock<sup>®</sup> ", permettant la solidarisation de la patte avec le dispositif en mousse.

- Design anatomique et solidaire de la patte
- Autorise tous les mouvements
- Facile d'utilisation et d'entretien grâce à sa peau de surface
- Sa thermo-sensibilité change la couleur à l' endroit du contact avec le corps au-dessus de 39 degrés.
- Modèle bilatéral

### **Contre-indications, précautions:**

Ne pas utiliser en cas d' allergie au Latex.

La thermo-sensibilité est indicative sans valeur de mesure, elle ne se soustrait pas à un contrôle habituel ou/et inopiné du soignant. En effet, des facteurs environnants peuvent modifier les seuils, tel que l' exposition au soleil, le contact avec un objet chauffant,etc...

### **Consignes d' utilisation:**

#### Mise en place du dispositif dans la housse

1- Mise en place de la Cocoon Sock<sup>®</sup> sur le dispositif en mousse, La patte entre par le trou rond, partie la plus large , sort par le trou le plus petit .

Le logo sera alors positionné au dessus, à l' ouverture en fente, en partie avant et basse de la Cocoon Sock.(Photo 1)

2- Insertion de La patte, avant ou après la mise en place de la housse, dans le **Kinepaw**<sup>TM®</sup> , l'ouverture de celui-ci devant être positionnée au dessus.(photo 2, 3)

3- il est conseillé de rabattre les bords extérieurs de la Cocoon Sock<sup>®</sup> sur le dispositif Kinepaw<sup>™®</sup> afin d' assurer le l' entrée et la sortie du pied afin d' éviter la manipulation répétée de la mise en place. il suffit de repositionner la housse en la re dépliant sur le Kinepaw<sup>™®</sup> (Photo 4)

Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



### **Conseils d'entretien et composition:**

#### **1/ Kinepaw<sup>™®</sup> :**

Composition : 100 % mousse de polyuréthane HR ,Moins de 50% de densité,  
peau de surface polyuréthane

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse ou, en cas de nécessité de désinfection,  
par l'utilisation d'un produit pour usage hospitalier type Anios ou équivalent.

#### **2/ housse : Cocoon Sock<sup>®</sup> :**

Composition : 55% coton , 22% Nylon, 10% Latex, 7% Elasthane, 6% Polyester

Entretien : Lavage 30°,à la main, repassage déconseillé, séchage machine  
déconseillé , chlorage interdit, nettoyage à sec interdit.

Matières Oekotex100

Le dispositif complet est en M/L, (50 à 60 au garrot)

En cas de détérioration du dispositif médical, changez-le. Ne pas essayer de réparer cet article.

**Important :** Bien que tous nos efforts aient été portés sur l'utilisation de techniques de pointe afin d'obtenir un niveau optimal de fonctionnalités, de résistance, de durabilité et de confort, il n'est pas garanti que l'usage de ce produit prévienne tout préjudice corporel.

Le packaging contient :

- 1  Kinepaw<sup>TM</sup>®
- 1 Housse Cocoon Sock<sup>®</sup>
- 1 NOTICE D'UTILISATION
- 1 ATTESTATION D'INFORMATION  
POUR UN USAGE INDIVIDUEL

### **Matériau-vigilance**

**En cas d'incident quelqu'il soit, vous devez aller sur le site [www.kinedog.com](http://www.kinedog.com), cliquer sur la rubrique "contact", remplir le formulaire dédié.**

**Il est primordial de signaler quelque problème , afin d'engager toutes les démarches utiles et sécuritaires.**

**Toute observation, même mineure doit être échangée pour permettre la mise à jour, l'amélioration constante du dispositif.**